




COMFORT GREEN

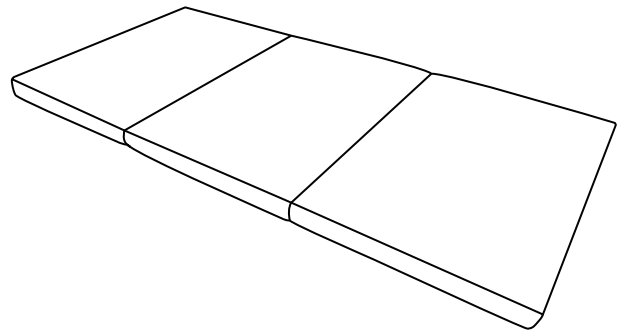

取扱説明書

# ブレスエアー<sup>®</sup>マツトレス

## もくじ

<b>基本の使いかた</b>	<b>1</b>
使用前のセット方法	1
使用后	1
<b>メンテナンス</b>	<b>2</b>
普段のお手入れ方法	2
へたってきたと感じたら	2
<b>困ったときは</b>	<b>3</b>
汚れたとき	3
カバー(側生地)の洗濯方法	3
中材の洗浄方法	3
破損したとき	4
生地破損	4
中材破損	4

# 基本の使いかた

取扱説明書

ブレスエアー<sup>®</sup> マットレス

## 使用前のセット方法

- － メッシュ面を上（寝る面）にして、スウェード面が床に接するように設置してください。
- － 側面のファスナーの破損を防ぐため、スライダー（引き手）は必ず収納部に収めてから使用してください。
- － 汚れや傷みから保護するため、必ずシーツをかけてからご使用ください。
- － 通気性に優れた素材ですので、液体をこぼすと床に到達する可能性があります。失禁などが懸念される場合にはベッドパッドや防水シーツの併用をお勧めします。
- － 冬場に床に直接敷いていて冷える場合は、床との間に断熱素材を敷くことをお勧めします。断熱素材の詳細については担当の営業スタッフまでお問い合わせください。
- － 寝心地の硬さが気になる場合は、ベッドパッドや綿ふとんなどの柔らかいものを重ねてください。
- － 床暖房やホットカーペットの上では使用しないでください。熱により劣化が早まります。

## 使用後

畳む際は、必ず折り目に合わせて三つ折りにしてください。無理に逆方向に折り曲げるとカバーが破損する恐れがあります。

移動させる時は必ず三つ折りの状態にしてください。広げたまま引き摺って移動させると折り目の部分が裂ける恐れがあります。

このような扱い方によってカバーが破損した場合、交換は実費となりますのでご注意ください。

# メンテナンス

取扱説明書

## ブレスエアー<sup>®</sup> マットレス

### 普段のお手入れ方法

通気性・抗菌性に優れているので、普段のお手入れは風通しの良い場所に立てておくだけで十分です。

- － 天日干しは劣化の原因になるのでしないでください。
- － ふとん乾燥機は劣化の原因になるので使用しないでください。
- － ふとん叩きは破損の原因になるのでしないでください。

### へたってきたと感じたら

新品のブレスエアー<sup>®</sup>は、硬いと感じることがありますが、最初の1週間ほどで馴染んで少し柔らかくなり、その後は安定して長期間一定の硬度を保ちます。

腰やお尻が当たる真ん中のユニットは、体重が集中するため他のユニットに比べ早く硬度が下がってきます。

寝心地を長期間持続させるため、3～4年毎を目安に中材をローテーションさせてご使用ください。

#### 中材ローテーションの目安と方法

- － 導入から3～4年で真ん中と脚側のユニットを交換
- － 導入から7～8年で頭側と真ん中（もともと脚側）のユニットを交換

ローテーションに適切な時期は、稼働率や使用方法や温度などによっても異なります。わからない場合は、担当の営業スタッフまでお問い合わせください。

ローテーションしながら使用していてもへたってしまった場合は、新品のユニットと交換いたします。

# 困ったときは

取扱説明書

ブレスエアー<sup>®</sup> マットレス

## 汚れたとき

### カバー（側生地）の洗濯方法

1. カバーを開けて中材をすべて取り出します。
2. ファスナーを閉じて、畳んで洗濯ネットに入れます。
3. 洗濯機で、ドライコース／手洗い／ソフトコースなどの弱洗いを選択し、水温40℃以下で洗ってください。
4. 風通しの良い日陰に干して乾燥させてください。
  - － 乾燥機は使用しないでください。
  - － 漂白剤は使用しないでください。
  - － アイロンは使用しないでください。

油性の汚れや、血液、嘔吐物などの重大な汚れの場合は、お近くのクリーニング店にご相談ください。

交換用カバーの購入をご希望の場合は、担当の営業スタッフまでご連絡ください。

### 中材の洗浄方法

1. カバーを開けて中材を取り出し、中材についているカバーも外します。
2. 浴室のシャワーなどを使って水洗いします。  
お湯を使う場合は必ず40℃以下にしてください。  
汚れや臭いが取れにくい場合は中性洗剤を薄めて使用してください。
3. タオルなどで水分を拭き取り、振って水気をよく切ります。
4. 風通しのよい日陰に立てて十分に乾かしてください。  
扇風機などで風をあてると乾きが早くなります。
  - － 漂白剤や塩素系の洗剤、アルカリ系の薬品等は使用しないでください。
  - － 乾燥機は使用しないでください。
  - － 直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。変色や劣化の原因となります。

# 困ったときは

取扱説明書

## ブレスエアー<sup>®</sup> マットレス

### 破損したとき

#### カバーの破損

初期不良や経年劣化による破損の場合は無償交換いたします。  
事故や不適切な使い方による破損の場合は有償での交換となります。

#### 無償交換できるケース

- － 三つ折りの接合部分が裂けて使用できない状態になった場合
- － 角の部分やそれ以外の部分が擦れ穴があいた場合
- － 縫い目がほつれ使用できない状態になった場合

#### 有償での交換となるケース

- － 三つ折りにせず広げたまま移動させたり乱暴に扱うなどして破損した場合
- － ファスナーのスライダーを収納部に収めないまま使用し破損した場合
- － タバコの火で穴があいたり鋭利なものに引っ掛けて破れた場合

#### 中材の破損

原則として、初期不良の場合以外は有償での交換となります。  
もしへたりがひどく使用に耐えないと感じるときは、担当の営業スタッフにご相談ください。

対象の中材を測定し、厚みと硬度が規定の劣化率を超えている場合は無償交換いたします。

ご要望に応じて有償での交換も可能です。

カバーおよび中材の無償交換の条件には善管注意義務が伴います。  
借主は善良な管理者の注意をもってレンタル物品を取り扱うことが前提となることを予めご了承ください。